

## Pozycjonery :

# Techniczne wyroby pomocnicze z mikrokulkami dla utrzymania pozycji

### ZALECENIA

Pierwszym krokiem w profilaktyce odleżyn u leżącego pacjenta jest zmiana punktów podparcia ciała na materacu średnio co 3 godziny, aby ograniczyć zbyt długie ściskanie naczyń przez wystające elementy kostne i umożliwić ukrwienie tkanek.

### INSTALACJA

- Patrz wszystkie możliwe konfiguracje na ostatniej stronie.

### WSKAZANIA

Ułożenie poszczególnych części ciała (biodra, kolana, stopy) w pozycji leżącej

### PRZECIWSKAZANIA

Poduszka modułowa w kształcie koła (VCP12CIC) nie jest przeznaczona dla pacjenta siedzącego.

### SKŁAD TECHNICZNYCH WYROBÓW POMOCNICZYCH:

- **PODUSZKA:** Pokrowiec zgrzewany CIC (kontrola zakażeń krzyżowych) Ag+ (Sanitized Ag) mikrokulki ze spienionego polistyrenu (EPS), wypełnione w 99% powietrzem, nici poliestrowe o właściwościach bakteriostatycznych.

### CZYSZCZENIE/DEZYNFEKCJA: • Total Protection Ag+

100% Promust CIC: 58 % poliestru – 35 % poliuretanu poliwęglanowego – 8% innych materiałów.



Wyrób zabezpieczony substancją biobójczą bez zagrożenia dla użytkownika. [www.winncare.fr](http://www.winncare.fr)

### ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OSŁONAMI

- Możliwy jest bezpośredni kontakt z uszkodzoną skórą pacjenta (Oeko-Tex®100 klasa 1)
- Nie używać produktów ściernych, czyszczących ani rozpuszczalników oraz przedmiotów ostrych i tnących w bezpośrednim kontakcie z pokrowcem.
- Sprawdzaj wzrokowo jeden lub kilka razy w roku prawidłowy stan poduszek. W przypadku wyraźnej zmiany wyglądu lub uszkodzenia pierwszego zgrzewu produkt należy wycofać z użycia i usunąć.

### PRZECHOWYWANIE

- Produkty powinny być przechowywane na płasko i zabezpieczone przed bezpośrednim światłem słonecznym i nadmierną wilgocią.

### USUWANIE WYROBÓW MEDYCZNYCH

- Nie palić i nie wyrzucać produktów poza wyznaczonymi miejscami.

### GWARANCJA

Okres gwarancji wyrobów pomocniczych mikrokulkowych CIC wynosi 1 rok w normalnych warunkach użytkowania. Obowiązuje ona od daty zakupu u dystrybutora. Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia wyrobu i jego pokrowca, i nie zastępuje gwarancji prawnych. Prosimy skontaktować się ze sprzedawcą i przekazać mu uszkodzony produkt, podając numer partii (patrz oznakowanie metodą sitodruku na powierzchni pokrowca).

Sprzedawca podejmie niezbędne kroki wobec WINNCARE Services (04 66 02 15 23) w celu naprawy lub standardowej wymiany wyrobu.

### Zapobieganie powstawaniu odleżyn na poziomie:

Nie namacać. Umyć ręką i szybko sputkać	
Nie prasować.	
Używanie dopuszczalnego środka zawierającego chlor (roztwór rozcieńczony w stosunku 1:200.)	
Używanie zatwierdzonego detergentu dezynfekującego do powierzchni	
Nie czyścić na sucho	
Nie suszyć mechanicznie	
Czyszczenie w tunelu myjącym	
Czyszczenie parą wodną	
Uwaga! patrz podręcznik użytkownika i (lub) instrukcja obsługi	
Zgodne z obowiązującymi dyrektywami europejskimi	

Materace ALOVA powinny być przechowywane na płasko i zabezpieczone przed bezpośrednim światłem słonecznym i nadmierną wilgocią.	
---	--