

HYPEROil[®]

INSTRUKCJA UŻYCIA



HYPEROil®

Klasyfikacja

CND M040499

Dystrybutor

Mediqual Sp. z o.o.
tel. +48 42 209 49 04
www.mediqual.pl
e-mail: bok@mediqual.pl



Opis opatrunku

Hyperoil® jest zaawansowanym opatrunkiem antyseptycznym i przeciwobrzękowym, zapewniającym efekt śmierzający. Opatrunek bazuje na składnikach roślinnych (składniki aktywne to: azadyrachtyna i hyperforyna) jest dostępny w postaci olejku, żelu oraz gaz nasączonych żelem i kremem. Antyseptyczne właściwości Hyperoil® oraz efekt ochronny i nawilżający tworzą i pomagają utrzymać idealne nawilżone środowisko dla rany jednocześnie chroniąc tkankę. Sprzyja to gojeniu się różnego rodzaju zmian skórnych, otarć i ran błony śluzowej (np: szczeliny odbytu). W przypadku poważnych, chronicznych zmian skóry, przy których występuje strata tkanki miękkiej i skóry lub odsłonięcie kości, Hyperoil® pomaga autolitycznie oczyścić ranę stymulując formowanie się tkanki ziarninowej. Podtrzymując nawilżenie tkanki Hyperoil® zapobiega tworzeniu się strupów i naceracji okolic rany.

Wskazania

Sprzyja regeneracji i naprawie tkanki w przypadku wszystkich zewnętrznych zmian skórnych: owrzodzeń spowodowanych uciskiem (odleżyny), owrzodzeń żylnych (leczenie zespołu stopy cukrzycowej), powierzchownych urazów skóry oraz głębokich ran urazowych (gdzie skóra i kości zostają odsłonięte), oparzeń 1. stopnia, pęknięć, przetok, ropni i wszelkich zainfekowanych zmian.

Instrukcje użycia

Ranę oczyścić roztworem soli fizjologicznej. Nałożyć Hyperoil®, a następnie, w przypadku ran z wysiękiem, zastosować chłonny opatrunek gazowy (np.: gazę TNT). Preparat oleisty jest zalecany do stosowania podczas czyszczenia (strupy lub tkanka martwicza). Opatrunek żelowy może być stosowany w fazie ziarninowania. Gazы nasączone żelem są polecane w okresie odbudowy nabłonka w miejscu rany. W przypadku ran zainfekowanych lub z płynem wysiękowym, Hyperoil® należy stosować co 24 godziny. Stosowanie leku Hyperoil® można powtarzać co dwa, trzy, cztery lub siedem dni, zależnie od tego jakiego rodzaju zmiana skórna jest leczona oraz od opinii personelu medycznego specjalizującego się w leczeniu ran. Podczas leczenia z wykorzystaniem Hyperoil® stosowanie środków dezynfekujących jest odradzane.

Ostrzeżenia

W miejscu leczonym opisywanym lekiem wystąpić może tymczasowe wrażenie pieczenia, swędzenia lub zaczerwienienie. Wystąpić może również nadwrażliwość na aktywne składniki - w takim przypadku leczenie należy przerwać.

Opakowanie

Butelka 250 ml (preparat oleisty)
Butelka 100 ml (preparat oleisty z rozpylaczem)
Butelka 50 ml (preparat oleisty z zakraplaczem)
Spray żelowy 100 ml (z rozpylaczem)
Tubka 30 ml kremu
Gazy nasączone lekiem (10 x 10 cm, opakowanie 10 szt.)
Gazy nasączone wazeliną o.p. (10 x 10 cm, opakowanie 40 szt.)



WIELOFUNKCYJNY, SAMOWYSTARCZALNY ZAAWANSOWANY OPATRUNEK NA DOWOLNE ZMIANY SKÓRNE, DOSTĘPNY W KAŻDEJ CHWILI

PODSTAWOWA INSTRUKCJA UŻYCIA HYPEROIL®

Stosowanie Hyperoil® zawsze obejmuje trzy proste kroki:

- **OCZYSZCZANIE** (ranę należy oczyścić solą fizjologiczną)
- **NAŁOŻENIE**
- **OSŁONIĘCIE** z wykorzystaniem ochronnego lub chłonnego bandaża zabezpieczającego

Te trzy kroki należy powtarzać za każdym razem podczas zmiany opatrunku

CZĘSTOTLIWOŚĆ STOSOWANIA LEKU zależy od stanu zmiany skórnej, a także od FAZY gojenia tej zmiany (poniżej zamieszczono sugerowane zalecenia):

FAZA OCZYSZCZANIA	➡ bardzo często (co 12 godz./1 - 2 dni)
FAZA ZIARNINOWANIA	➡ często (co 2 - 4 dni)
FAZA ODBUDOWY NABŁONKA	➡ rzadziej (co 3 - 7 dni)



OCZYSZCZANIE:

WAŻNE OSTRZEŻENIA!

NIE STOSOWAĆ ŚRODKÓW DEZYNFEKUJĄCYCH, MAŚCI ANTYSEPTYCZNYCH, ani innych LEKÓW.

Stosowanie innych preparatów sprawia, że działanie Hyperoil® jest częściowo lub całkowicie niwelowane!

1. Rany **PRZEMYĆ** dużą ilością roztworu soli fizjologicznej używając sterylnej strzykawki bez igły o pojemności 20 cm³. Do oczyszczenia rany użyć można również **GAZ Hyperoil®** (zamiast roztworu soli fizjologicznej).

Jeśli wybrane zostaną gazy, cały obszar RANY należy **DELIKATNIE DOTYKAĆ BEZPOŚREDNIO GAZAMI Hyperoil®**. Gdy tylko **GAZA Hyperoil®** używana do oczyszczania rany wyda się zabrudzona, należy ją wyrzucić i zastąpić nową. Przejść do fazy 2.

2. Powierzchnię zmiany skórnej **DELIKATNIE DOTYKAĆ** z użyciem sterylnych, hydrofilowych GAZ TNT, w celu **OSUSZENIA**. Gdy tylko gaza używana do osuszenia rany wyda się nasączona i/lub zabrudzona, należy ją wyrzucić i zastąpić nową. Działanie to należy kontynuować do chwili, aż rana będzie całkowicie sucha i czysta.



NAKŁADANIE:

1. Czy na ranie występuje martwica?

Jeśli tak, w pierwszej kolejności przeprowadzić należy autolityczne oczyszczanie z wykorzystaniem Hyperoil®, by usunąć strupy.

W przypadku tkanki martwiczej (strupów) zastosować można preparat OLEISTY lub ŻELOWY. Należy go nakładać w szczególności na tkankę okolic rany, aby strupy oddzieliły się od skóry.

W rzeczywistości, aby Hyperoil® mógł usunąć tkankę martwiczą, konieczne jest utworzenie wejścia, przez które opatrunek będzie mógł wnikać w obszar pomiędzy strupami i znajdującymi się pod nimi zmianami skórnymi. Aby pomóc w utworzeniu takiego wejścia, strupy i tkankę okolic rany należy zmiękczyć. By to uzyskać i w większym stopniu zmiękczyć tkankę, wraz z preparatem OLEISTYM lub ŻELOWYM zaleca się użycie GAZY Hyperoil®. Spowoduje to oczyszczenie autolityczne. Gdy tylko strup nieznacznie odejdzie na krawędziach, pozwoli to na dotarcie Hyperoil® do znajdujących się pod spodem naczyń włosowatych okolic rany, a wtedy tkanka martwicza oddzieli się po upływie bardzo krótkiego czasu. Obszar wokół rany może być oczyszczany wyłącznie z użyciem roztworu soli fizjologicznej lub Hyperoil®.

2. Czy obecna jest tkanka o białawym, beżowym, żółtym, zielono-żółtym, brązowym i / lub czarnym kolorze? Czy zmiana skórna brzydko pachnie?

Jeśli odpowiedź na jedno lub oba te pytania brzmi „tak”, zaleca się nakładanie OLEISTEGO preparatu Hyperoil® do chwili, aż opisane powyżej objawy ustąpią, a następnie kontynuowanie leczenia z użyciem preparatu ŻELOWEGO.

3. Czy ze zmiany skórnej wydostaje się wysięk? W jakiej ilości?

Jeśli tak, należy zastosować gazę o zwiększonej chłonności. Im większy jest wysięk ze zmiany skórnej, tym bardziej chłonny powinien być opatrunek.

JAKĄ ILOŚĆ OPATRUNKU NALEŻY STOSOWAĆ?

Ilość nakładanego preparatu Hyperoil® jest określana zależnie od wielkości zmiany skórnej oraz FAZY w jakiej rana się znajduje, np.: w przypadku zmiany skórnej o rozmiarach 10 cm x 10 cm W FAZIE OCZYSZCZANIA należy użyć:

- w przypadku sprayów (oleistych lub żelowych) -> **ok. 3 tryśnięcia**
- w przypadku zakraplaczy (50 ml, oleisty) -> **2 pipety**
- jeśli wykorzystywana jest tuba ŻELU, należy nałożyć dostateczną ilość opatrunku, by zakryła całą powierzchnię zmiany skórnej bardzo cienką warstwą.
- jeśli wykorzystywane są GAZY Hyperoil®:
 - 1 gaza lub, gdy zmiana jest głęboka, 2 gazy złożone tak, by tworzyły dwie warstwy, umieszczone obok siebie, zakrywające całą zmianę skórą.
 - jeśli zmiana jest bardzo głęboka, należy użyć 4 GAZ Hyperoil® złożonych i tworzących 4 warstwy, umieszczonych obok siebie, aby zakrywały całą zmianę skórą.

Podczas następnych FAZ zmiany skórnej:

ZIARNINOWANIE -> połowa ilości

ODBUDOWA NABŁONKA -> zmniejszyć do jednej trzeciej


Liczba GAZ Hyperoil® nie podlega zmniejszeniu, ponieważ jest to liczba potrzebna do zakrycia całej powierzchni zmiany skórnej, włącznie z częścią skóry wokół rany i musi być zawsze stosowana.

BARDZO WAŻNE!

**Aby poprawnie leczyć z użyciem Hyperoil®,
(w przypadku wszystkich form preparatu) należy
pamiętać, że wystarczająca jest cienka warstwa
opatrunku nałożona na powierzchnię zmiany
skórnej. Warstwa ta nie musi być równomierna.**

Sposób nakładania różnych form preparatu:

Hyperoil[®] w formie SPRAYU (OLEISTEGO lub ŻELOWEGO): po natryśnięciu odpowiedniej ilości opatrunku na zmianę skórą, należy go rozprowadzić palcem. Należy zwrócić uwagę, by opatrunek rozprowadzić po całej powierzchni zmiany, a także na zdrowej skórze wokół rany.

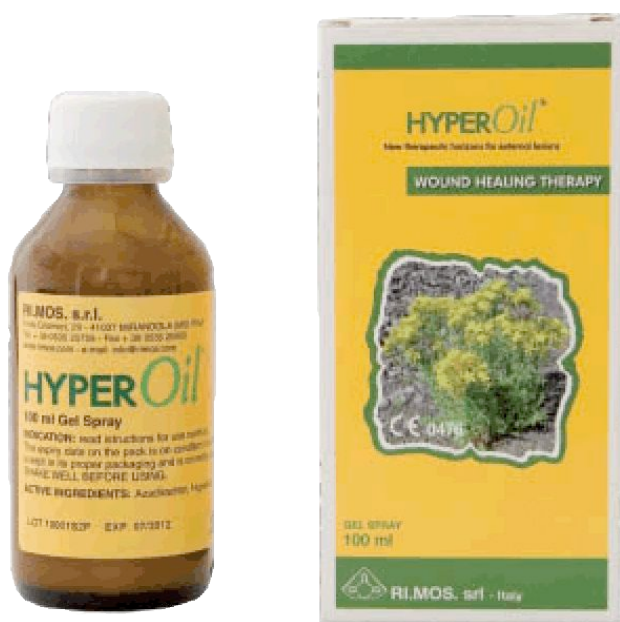


**BUTELKA 100 ml,
OPATRUNEK ŻELOWY z
ROZPYLACZEM**





**BUTELKA 100 ml,
OPATRUNEK OLEISTY z
ROZPYLACZEM**

OPATRUNEK OLEISTY Hyperoil[®] w formie ZAKRAPLACZA: po nałożeniu opatrunku na zmianę skórą tak równomiernie, jak jest to możliwe, rozprowadzić palcem. Należy zwrócić uwagę, by opatrunek rozprowadzić po całej powierzchni zmiany, a także na zdrowej skórze wokół rany.

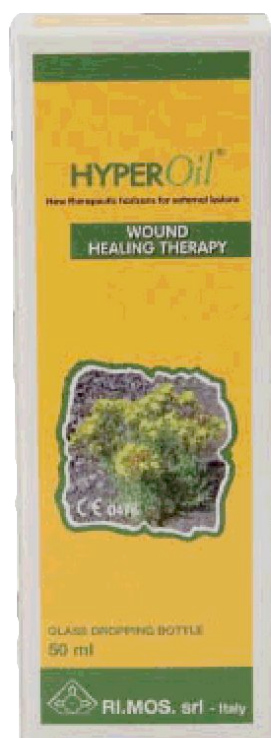

**BUTELKA 50 ml,
OPATRUNEK OLEISTY z
ZAKRAPLACZEM**

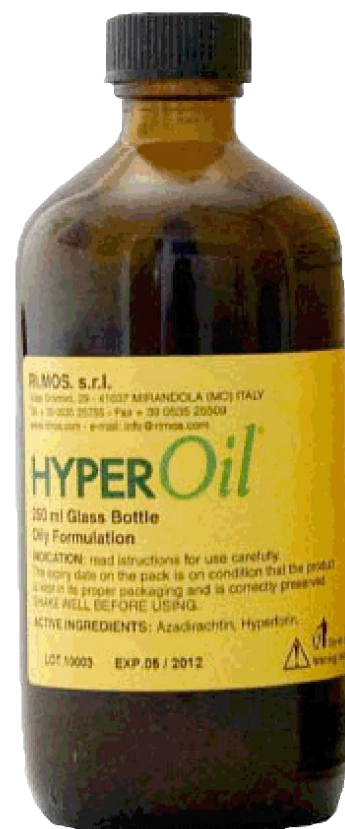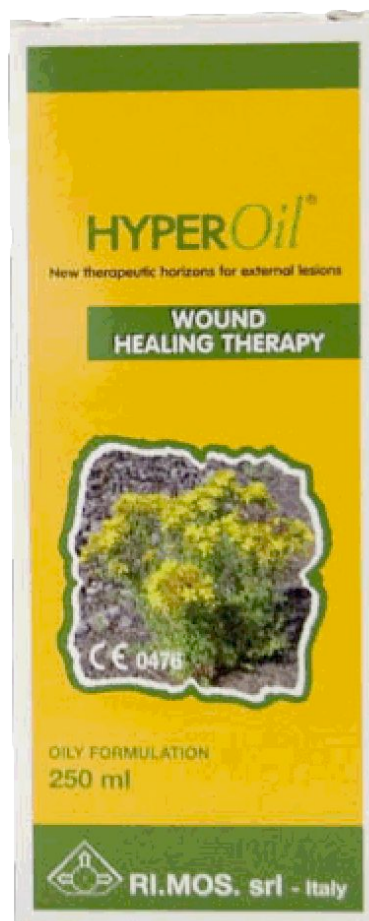

**BUTELKA 250ml,
OPATRUNEK OLEISTY**

Hyperoil[®] w ŻELU lub KREMIE ŻELOWYM, w tubie: **OPATRUNEK** nanieść na palce, a następnie równomiernie rozprowadzić po całej powierzchni zmiany skórnej, a także na zdrowej skórze wokół rany. **OPATRUNEK** jest całkowicie wchłaniany i nie jest tłusty.



TUBA 30 ml,
OPATRUNEK ŻELOWY
z DOZOWNIKIEM

GAZY Hyperoil[®] najlepiej jest wyjmować z opakowania z wykorzystaniem pincety. Jeśli pinceta nie jest dostępna, należy zrobić to ręcznie. Aby jednak gazy nie wyschły, należy pamiętać, by pudełko szybko i pewnie zamknąć. Mówiąc ogólnie, w przypadku umiarkowanych powierzchownych zmian skórnych **GAZY Hyperoil[®]** powinny być składane tak, by uzyskać dwie warstwy, natomiast w przypadku głębszych zmian - by uzyskać cztery warstwy. Muszą one zakrywać (i jeśli zachodzi taka konieczność wypełniać) całą powierzchnię zmiany skórnej, najlepiej łącznie ze skórą znajdującą się wokół rany. Jeśli zmiana skórna jest bardzo płytka, **GAZY Hyperoil[®]** można również stosować bez składania.



PUDEŁKA, 10 szt. (10 X 10) GAZ NASĄCZONYCH HYPEROIL[®]
PUDEŁKA, 40 szt. (10 X 10) GAZ HYPEROIL[®] z WAZELINĄ O.P.



W przypadku cięższych zmian skórnych dobrze jest zastosować preparat OLEISTY lub ŻELOWY Hyperoil® wraz z GAZAMI Hyperoil®, by wspomóc gojenie się rany poprzez stopniowe, nieprzerwane uwalnianie opatrunku. **GAZY Hyperoil® powinny być utrzymywane na miejscu z wykorzystaniem sterylnych gaz TNT, zabezpieczonych oddychającymi plastrami opatrunkowymi, które, jeśli zajdzie taka potrzeba, mogą być zabezpieczone bandażami lub innymi środkami pomocniczymi.**

Czasem lokalizacja rany utrudnia utrzymanie opatrunku na miejscu. Problem ten jest częściej dotyka preparatu OLEISTEGO, niż ŻELOWEGO, który z większą łatwością pozostaje na zmianie skórnej. W przypadku wątpliwości co do tego, czy **Hyperoil®** (ŻELOWY lub OLEISTY) utrzyma się na zmianie skórnej, zaleca się zastosowanie również GAZ **Hyperoil®**, jak zostało to opisane we wskazówkach dotyczących stosowania różnych form preparatu. Na przykład, w przypadku odleżyn korzystne jest wypełnienie wgłębienia zmiany skórnej GAZAMI **Hyperoil®** lub sterylnymi gazami TNT nasączonymi preparatem OLEISTYM lub ŻELOWYM.



OSŁONIĘCIE:

Najlepszymi środkami, jakich można użyć, by osłonić zmianę skórą po nałożeniu wymaganego preparatu **Hyperoil®** są:

- sterylne, hydrofilowe GAZY TNT
- CHŁONNE OPATRUNKI UCISKOWE
- BANDAŻE PÓŁELASTYCZNE

Zasada jest następująca:

- na zmianę skórą z niewielką lub umiarkowaną wydzieliną wystarczy zastosować GAZY TNT
- na zmiany skórne z obfitą wydzieliną konieczne jest zastosowanie chłonnych OPATRUNKÓW lub OPATRUNKÓW UCISKOWYCH

W razie wątpliwości zastosować należy OPATRUNKI UCISKOWE, a następnie dodać jedną lub kilka GAZ TNT zabezpieczonych BANDAŻEM utrzymującym opatrunek na miejscu.



Później należy postępować w następujący sposób:

1. Wziąć dostateczną ilość leku, by pokryć całą zmianę skórną:
 - GAZY TNT, jeśli z rany wydostaje się mała lub umiarkowana ilość wysięku.
 - CHŁONNE OPATRUNKI lub OPATRUNKI UCISKOWE, jeśli z rany wydostaje się duża ilość wysięku.
2. Aby GAZY TNT lub środki CHŁONNE przymocować do skóry, w odpowiedniej odległości od zmiany skórnej użyć należy oddychającego bandażu opatrunkowego.
3. Użyć BANDAŻA półelastycznego, by uniknąć przemieszczania się opatrunku Hyperoil.
4. W przypadku niektórych rodzajów zmian skórnych, a także zależnie od wskazań lekarza, **Hyperoil**® wraz z wymaganymi gazami i środkami ochronnymi/chłonnymi może być zabezpieczony z wykorzystaniem bandaża uciskowego lub skarpet.
5. Jeśli GAZY i / lub BANDAŻ w całości są bardzo wilgotne i/lub plastry nie przywierają do skóry, konieczna jest jedynie wymiana gaz i pasów opatrunku; nie ma konieczności ponownego nanoszenia **Hyperoil**®.
6. Jeśli obecne są wrzody, zmianę należy na stałe obandażować i odnawiać opatrunek za każdym razem, gdy lek jest nakładany - przyspieszy to gojenie.
7. Aby OSŁONIĆ, a tym samym zapewnić ochronę i / lub wchłanianie, najlepiej jest użyć gęsto tkanych gaz, natomiast do OCZYSZCZENIA teoretycznie lepiej jest użyć gaz o rzadszym splocie.
8. **Hyperoil**® jest efektywnym środkiem nawilżającym zarówno w przypadku leczenia utraconego nabłonka, jak i skóry, która stała się sucha na skutek bandażowania. Wystarczy nakładać opatrunek, w formie ŻELU lub KREMU ŻELOWEGO, na zmienione obszary za każdym razem, gdy bandaż jest ponownie zakładany.



W wielu przypadkach użycie Hyperoil® może zredukować lub usunąć potrzebę stosowania lokalnej terapii antybiotykowej, a także zmniejszyć dawkę i czas terapii antybiotykowej.

BEZ ODPOWIEDNIEGO DOPŁYWU TLENU, TKANKI NIE MOGĄ SIĘ GOIĆ:

**Aby Hyperoil® mógł odpowiednio zadziałać,
konieczna jest odpowiednia perfuzja skóry.**
Opatrunek jest nieskuteczny tam, gdzie dotlenienie tkanki wynosi poniżej 30 mm Hg O₂.

WRAŻENIE PIECZENIA

Zastosowanie opatrunku, we wszystkich formach, może prowadzić do powstania mijającego wrażenia pieczenia, swędzenia lub zaczerwienienia wokół uszkodzonego obszaru. Opatrunek jednak stopniowo złagodzi ból w miejscu zmiany skórnej i będzie sprzyjał gojeniu.

KRWAWIENIE ZE ZMIANY SKÓRNEJ

**Krwawienie zmiany skórnej, która trudno się goi,
to pozytywny znak**, ponieważ oznacza on, że w chronicznej zmianie zachodzi proces gojenia

Rezultaty są widoczne!

Przeznaczenie

Produkt stosowany jest pomocniczo w celu zregenerowania tkanki skórnej w przypadku urazów ostrych i chronicznych (powierzchnowe urazy skórne różnej natury, niewielkie poparzenia, pęknięcia, owrzodzenia spowodowane uciskiem, urazy naczyniowe, również na tle cukrzycowym, w których występuje odsłonięcie skóry właściwej i/lub tkanki kostnej). Szczególnie zalecany jest również w stanach po przeszczepach skórnych. Dzięki działaniu ochronnemu na tkanki oraz swoich właściwościach bakteriostatycznych ułatwia gojenie otarć różnej natury oraz pęknięć skóry. W przypadku trudnych urazów skóry, wiążących się z utratą tkanki i odsłonięciem skóry właściwej, sprzyja zmniejszeniu ilości fibryny i stymuluje powstawanie tkanek łącznych. Produkt utrzymuje właściwy poziom nawilżenia tkanki, zapobiegając powstawaniu strupów i maceracji w obrębie rany. Produkt nie ułatwia kolonizacji bakteryjnej leczonych miejsc.

Wyrób medyczny. Tylko do użytku zewnętrznego.

Typologia użytkowników

Wyrób nadaje się do użytku w placówkach służby zdrowia, jak również do użytku domowego przez personel odpowiednio przeszkolony w zakresie użytkowania produktu pod kontrolą lekarską.

Sposób użycia

Przed nałożeniem produktu i oczywiście przed każdorazową zmianą opatrunku czy ponowną aplikacją ranę skórną należy oczyścić zgodnie ze standardowymi procedurami. W razie występowania tkanki martwicznej lub wysuszonych strupów w ranach skórnych, które nie pokryły się jeszcze całkowicie nowym nabłonkiem, należy je usunąć. Owrzodzenia szybko się leczą, jeżeli są stale zabandażowane, a opatrunek należy zmieniać przy każdorazowym nakładaniu leku. Produkt dostępny jest w różnych postaciach i należy go stosować z różną częstotliwością od dziennej do tygodniowej, zgodnie z zaleceniami lekarza, uwzględniając potrzeby, typ oraz miejsce leczonej rany.

Olejek - Brązowe flakony szklane z kroplomierzem lub bez

W przypadku małych i dużych kraterów pozbawionych tkanek podporowych (np. rozległe odleżyny) produkt można nakładać bezpośrednio na jałową gazę i przykładać aż do pokrycia całego obszaru zmienionego chorobowo. W celu utrzymania gazy na miejscu można na nią nałożyć nieprzemakalny i półprzepuszczalny materiał (taki jak przejrzysta folia olietylenowa).

Ważne. Gaziki nasączone olejkami Hyperoil należy usuwać i wymieniać na nowe przy każdorazowej zmianie opatrunku, bez konieczności przemycania rany, a w razie potrzeby wystarczyć wcześniejsze przemycie rany roztworem soli fizjologicznej.

Żel

W przypadku ran skórnych pokrytych włóknikiem, w których występują wgłębienia, wyłobienia lub znaczna utrata tkanki, produkt łatwiej jest nakładać w formie żelu bezpośrednio na obszar zmieniony chorobowo, a w celu jego utrzymania na miejscu stosuje się folię polietylenową. **Ważne.** Po zdjęciu folii należy usunąć pozostałości żelu z okolic rany. Przed ponownym nałożeniem żelu skórę należy obficie przemycić roztworem soli fizjologicznej.

Spray

Odkręcić korek i przykryć rozpylacz; po rozpyleniu odpowiedniej ilości przykryć ponownie korek, który zapewnia hermetyczne zamknięcie.

Gaziki nasączone produktem

Opakowanie zawierające 10 sztuk 10x10, nasączone produktem

Nadają się do stosowania również u osób z alergią na wazelinę lub jej nietolerancją.

Gaziki z wazeliną

Opakowanie zawierające 40 sztuk 10x10 z wazeliną

Nie nadają się do stosowania u osób z alergią na wazelinę lub jej nietolerancją.

Szczególnie zalecane do leczenia ostrych zmian chorobowych (poparzenia, otarcia, rany po zabiegach chirurgicznych) oraz chronicznych zmian chorobowych w fazie zmniejszonego pokrywania tkanki skórnej nowym nabłonkiem, przy predyspozycji do kolonizacji bakteryjnej i umiarkowanym tempie gojenia. Otworzyć opakowanie, chwycić gazik pęsetą i nałożyć go na uprzednio oczyszczoną zmianę chorobową. W razie potrzeby nałożyć dodatkowy opatrunek pochłaniający. **Ważne.** Gaziki należy usuwać co dwa/trzy dni i wymieniać na nowe przy każdorazowej zmianie opatrunku, bez konieczności przemycania rany lub po uprzednim jej przemyciu roztworem soli fizjologicznej.

Ograniczenia zastosowania

Produkt jest nieskuteczny w przypadku stosowania na tkankę martwiczą w przypadku hipoksji tkankowej poniżej 30 mmHg di O₂.

Przeciwwskazania

Podczas stosowania produktu nie należy równocześnie nakładać na zmiany chorobowe żadnych maści ani środków dezynfekujących. Niewłaściwe stosowanie formuł może spowodować opóźnienie regeneracji tkanek, utrudniając fizjologiczny proces gojenia. Istnieje możliwość wystąpienia nadwrażliwości na substancje czynne lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych - w takim przypadku należy przerwać leczenie i zastosować odpowiednią terapię. Przedłużone stosowanie produktu może spowodować tymczasową utratę owłosienia skórno. Stosowanie produktu w dowolnej postaci może powodować chwilowe uczucie pieczenia, krwawienie swędzenia lub zaczerwienienia wokół zmiany chorobowej ze stopniowym zmniejszaniem bólu w miejscu występowania rany.

Przebiegi

- W wielu przypadkach produkt umożliwia rezygnację z miejscowego stosowania antybiotyku lub skraca okres ustrojowego leczenia antybiotykiem.
- Unikać stosowania środków dezynfekujących, gdyż wpływają one negatywnie na proces zabiłniania rany.
- Chronić produkt przed stycznością z powietrzem i światłem. Z uwagi na to produkt można wystawiać na działanie powietrza tylko przez czas niezbędny do jego użycia. Bezpośrednio po użyciu należy starannie zamknąć pojemnik.
- Produkt należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. W temperaturach poniżej 16°C produkt w formie olejku może twardnieć, jednak bezpośrednio po nałożeniu na skórę ponownie powraca do postaci płynnej.
- Produkt składa się z substancji naturalnych pochodzenia roślinnego, nie jest szkodliwy dla zdrowia ani dla środowiska. Istnieje możliwość wystąpienia alergii nawet u osób, które nigdy wcześniej na nie nie cierpiały.
- Po użyciu zutylizować nasączone gaziki oraz pojemniki zgodnie z przepisami.
- Nie stosować tego samego nasączonego gazika u innych pacjentów.
- Produkt nie został poddany testom klinicznym na pacjentach z poparzeniami drugiego i trzeciego stopnia.
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci w wieku poniżej trzech lat.
- Przed użyciem wstrząsnąć.

Substancje czynne

Azadyrachtyna, hiperforyna

Wer. styczeń 2013 r. • Data ważności podana na opakowaniu odnosi się do produktu w nienaruszonym opakowaniu, przechowywanego w prawidłowy sposób.



Uwaga: Zapoznać się z instrukcją stosowania.

CE 0476




Zutylizować zgodnie z przepisami.



www.mediQual.pl

Firma certyfikowana:

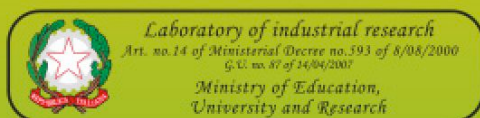

CE 0476
Wyrób medyczny IIb

Generalny Importer:

mediQual

MediQual Sp. z o.o.

tel. +48 42 209 49 04

e-mail: bok@mediQual.pl